

BEDIENUNGSANLEITUNG

brainLight®-Shiatsu-Massagesessel

flow




brainLight®

LIFE IN BALANCE

◆◆◆ Seit 1988 ◆◆◆

brainLight®-Shiatsu-Massagesessel *flow*

Vielen Dank, dass Sie sich für den **brainLight**-Shiatsu-Massagesessel *flow* entschieden haben. Wir bieten ihn mit oder ohne Fußteil an, diese Bedienungsanleitung ist für beide Varianten gültig.

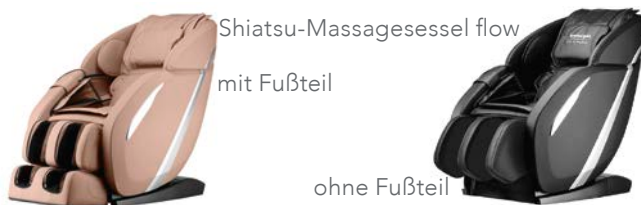

Der **brainLight**-Shiatsu-Massagesessel *flow* ist unser extra-robustes Powerpaket, ausgekleidet in OEKO-Tex 100 zertifiziertem Kunstleder! Einfach, aber einfach genial, kombiniert er verschiedene Luftdruck- und Rollenmassagetechniken und ist dabei besonders platzsparend. Außerdem stoppen die Massagerollen hier nicht im unteren Rückenbereich, sondern massieren auch das Gesäß. **Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem *flow*!**

HINWEIS: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut, um das umfangreiche Funktionsangebot Ihres Massagesessels von Anfang an bestmöglich genießen zu können.

GARANTIE UND KUNDEN*INNENSERVICE

Die **brainLight** GmbH räumt ihren Kunden*innen folgende Gewähr- und Garantieleistungen ein:

Privatkunden*innen:

- 24 Monate Gewährleistung auf neue Ware.
- 12 Monate Gewährleistung auf gebrauchte Ware.
- 24 Monate Garantie auf neue Ware.
- 6 Monate Garantie auf gebrauchte Ware.

Gewerbliche Kunden*innen:

- 12 Monate Gewährleistung auf neue Ware.
- 6 Monate Gewährleistung auf gebrauchte Ware.
- 6 Monate Garantie auf neue und gebrauchte Ware.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem System haben oder eine Reparatur notwendig sein, kontaktieren Sie bitte den **brainLight**-Kunden*innenservice:

per Telefon: Service-Hotline +49 (0)6021 5907-800
(Montag bis Freitag von 09 - 17 Uhr)

per E-Mail: kundenservice@brainlight.de
Wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise		Die Sesselfunktionen	
Gegenindikationen	4	Kurzanleitung	15
Installation und Inbetriebnahme	4	Steuerung über das Menü	16
Vor der Anwendung	5	Manuelle Anpassungsmöglichkeiten	21
Während der Anwendung	5	Weitere Sesselfunktionen	22
Nach der Anwendung	5		
Bauen Sie den Sessel nicht eigenständig auseinander	5	Erste Hilfe, Wartung & Pflege	
Die Wärmefunktion	6	Erste Hilfe: Kein Strom	23
		Reinigung & Pflege	23
Die Sesselkomponenten	7	Produkt- und Verpackungsmaße	26
Den Massagesessel bewegen	8	Technische Daten	27
Den Massagesessel platzieren	9		
Vor der Inbetriebnahme	10		
Das Bedienpanel	12		
Symbole des Bedienpanel-Displays	13		
Das Bedienpanel: Die Kurzwahltasten	14		

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Schäden, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden:

1. Gegenindikationen – Personen mit den folgenden Befindlichkeiten sollten vor der Nutzung des Shiatsu-Massagesessels *flow* ihre*n behandelnde*n Arzt*Ärztin oder Therapeuten*in konsultieren:

- Menschen mit Herzkrankheiten
- Menschen mit bösartigen Tumorerkrankungen
- Frauen während der Schwangerschaft oder Menstruation
- Menschen mit Rückenbeschwerden, Rückgratverkrümmungen oder -abnormalitäten
- Personen in ärztlicher Behandlung und in medikamentöser Therapie
- Personen mit Osteoporose, Diabetes und/oder sensorischen Beeinträchtigungen.

Nicht nutzen dürfen

- **die Wadenmassagefunktion:** Personen mit Thrombose und ähnlichen Venenleiden
- **die Massagefunktionen:** Kinder unter 14 Jahren
- **den Massagesessel:** Personen mit einem Gewicht über 120 kg.

Kinder, Kranke und Personen mit Handicap sollten den Sessel nur unter Aufsicht eines*r erwachsenen Betreuers*in benutzen.

2. Installation und Inbetriebnahme des Massagesessels:

- Der Massagesessel ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt, nutzen Sie ihn bitte nicht im Außenbereich.
- Wenn Ihr Massagesessel normalerweise in einem kalten Raum steht, dann erhöhen Sie die Raumtemperatur bitte nicht abrupt auf eine hohe Temperatur, sondern stufenweise immer um einige Grad.
- Wenn Sie den Massagesessel aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum transportieren, dann warten Sie bitte (wie bei jedem anderen elektrischen Gerät) ca. eine Stunde bis zur Inbetriebnahme. An den mechanischen Teilen des Sessels kann durch den Temperaturwechsel noch Wasser kondensieren und eine Fehlfunktion verursachen.
- Stellen Sie den Massagesessel nicht in Räumen auf, in denen Aerosole (Sprays) versprüht werden oder in denen Sauerstoffanwendungen stattfinden (z.B. Sauerstoff-Inhalationen).
- Stellen Sie den Sessel nur auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie den Sessel nicht in einer schmutzigen, öligen, nebligen oder feuchten Umgebung ein.
- Setzen Sie den Sessel keinem direkten Sonnenlicht aus und platzieren Sie ihn nicht zu dicht neben andere elektrische Geräte.
- Nutzen Sie den Sessel bitte nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 Grad Celsius.

3. Vor der Anwendung:

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich durch, bevor Sie Ihren Massagesessel benutzen.

4. Während der Anwendung:

- Lassen Sie Kinder nicht auf dem Sessel spielen.
- Kinder unter 14 Jahren sollten nur die Wärme-Funktion des Sessels und diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen.
- Berühren Sie die Mechanik des Sessels nicht mit Ihren Händen oder Füßen.
- Bitte stützen Sie sich nicht auf das Fußteil, um Verletzungen und Schäden am Sessel zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Sessel nicht in nassem Zustand (nach dem Baden oder Duschen) und bedienen Sie ihn nicht mit feuchten Händen.
- Setzen Sie sich mit aufrechter Haltung in den Sessel.

- Führen Sie keine Gegenstände in die Mechanik, das Sitzkissen und das Fußteil des Sessels ein.
- Der Massagesessel sollte nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
- Verzehren Sie bitte keine Getränke oder Speisen, während Sie den Massagesessel nutzen.

5. Nach der Anwendung:

- Wir empfehlen Ihnen, nach Benutzung des Sessels – so wie nach jeder Massage – viel Wasser zu trinken, um Ihrem nun in Fahrt gekommenen Lymphsystem beim Abtransport der Gifte und Schlacken zu helfen.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Sessel nicht in Gebrauch ist.

6. Bauen Sie den Massagesessel nicht eigenständig auseinander!

- Versuchen Sie nicht, den Sessel ohne qualifizierte Anleitung der **brainLight** GmbH eigenhändig zu demontieren, zu reparieren oder zu modifizieren. Bei nicht fachgerecht durchgeführten Reparaturen am Sessel können Sie alle Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung verlieren.
- Reinigen Sie den Sessel nicht mit alkoholhaltigen oder Dampf erzeugenden Lösungen (siehe auch die Pflegeanleitung auf S. 23ff.).

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie den Sessel reinigen.

ACHTUNG:

- Sollten Sie sich während der Benutzung des Sessels unwohl oder krank fühlen, unterbrechen Sie die Anwendung sofort mit der An-/Aus-Taste (siehe S. 12).
- Sollte der Bezugstoff des Sessels beschädigt oder abgenutzt sein, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie die **brainLight** GmbH.
- Wenn Sie Haarprodukte auf Öl-/Wachsbasis oder Gel verwenden, legen Sie bitte ein Handtuch unter den Kopf, um den Bezugstoff des Sessels zu schonen.
- Bitte gehen Sie behutsam mit dem Bedienpanel um und betätigen Sie die Tasten nur mit trockenen Händen. Sie müssen nur leicht mit der Fingerspitze auf die Tasten drücken. Bitte verwenden Sie keine anderen, insbesondere keine spitzen Gegenstände dazu (Stifte, Fingernägel etc.).

WÄRME-FUNKTION

- Personen mit Handicaps oder mit eingeschränkten Sinneswahrnehmungen sollten die WÄRME-Funktion nicht nutzen, um eine als zu stark empfundene Wärmeeinwirkung zu vermeiden.
- Für ein optimales Wohlbefinden empfehlen wir die Anwendung der WÄRME-Funktion vor allem in Kombination mit den Massagefunktionen.
- Schalten Sie auf dem Bedienpanel die WÄRME-Funktion separat aus, bevor Sie den gesamten Sessel mit dem EIN-/AUS-Schalter abschalten.

HINWEIS: Die WÄRME-Funktion ist nur im seitlichen Rückenbereich verfügbar (siehe Abbildung auf Seite 20) und kann bei Nutzung eines Automatikprogramms oder einer manuellen Massage einfach über das Menü am Bedienpanel ein- und ausgeschaltet werden.

Die Sesselkomponenten

Zubehör (1): Tasche für Bedienpanel und **brainLight**-Visualisierungsbrille, kann per Klettverschluss am rechten Seitenteil angebracht werden

Kopfstütze mit Auflagekissen

Faltbare Rückenauflage

Luftkissen für Schultermassage

Luftkissen für Arm- und Handmassage


linkes Seitenteil

rechtes Seitenteil

Luftkissen für Wadenmassage

Luftkissen und Massagerollen für Fußsohlenmassage, falls ein Fußteil vorhanden

Hauptsicherung

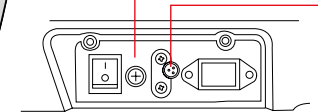

Hauptschalter-Panel an der Rückseite des Sockels

Sockel mit Transportrollen



Zubehör (3):


Verbindungskabel zur

brainLight-Tiefenentspannungseinheit

Zubehör (2): Einlagepads für den Fußbereich, um bei Bedarf die Massageintensität abzdämmen

Den Massagesessel bewegen


- Schalten Sie den Sessel am Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bitte decken Sie den Fußboden vor dem Transport mit einem geeigneten Material ab, um Schäden zu vermeiden.
- Kippen Sie den Sessel so wie in der Abbildung gezeigt und fahren Sie ihn auf den hinteren Transportrollen zum gewünschten Platz.

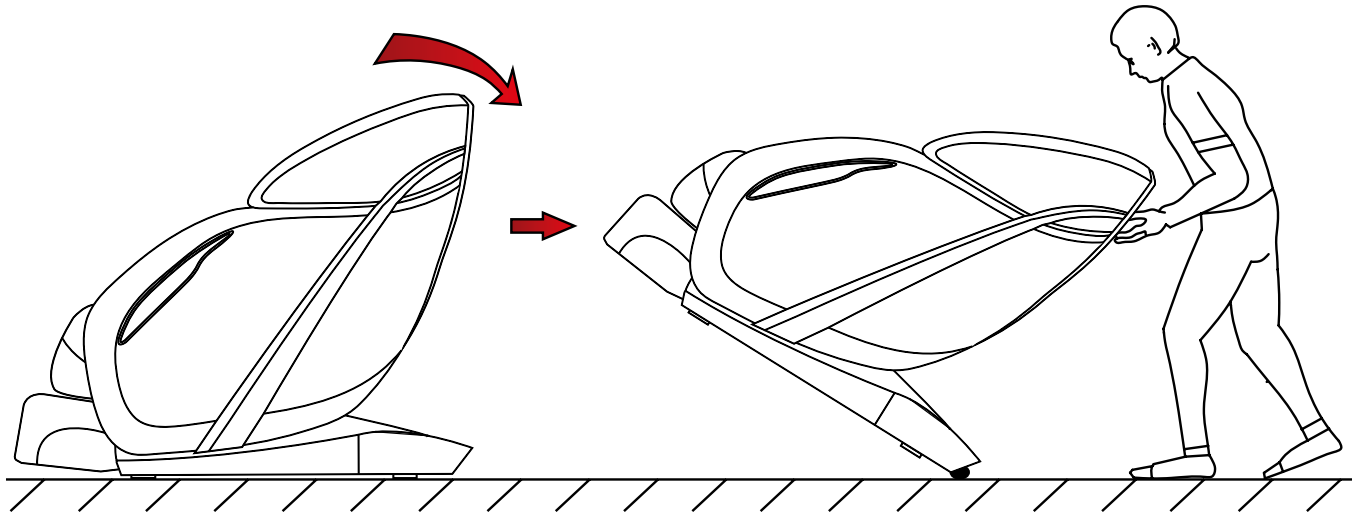

Den Massagesessel platzieren

Bitte stellen Sie sicher, dass vor dem Massagesessel mindestens 35 cm Platz sind und hinter dem Sessel mindestens 5 cm, damit die Rückenlehne des Sessels


während des Massageprogramms ohne Behinderung zurückfahren kann.

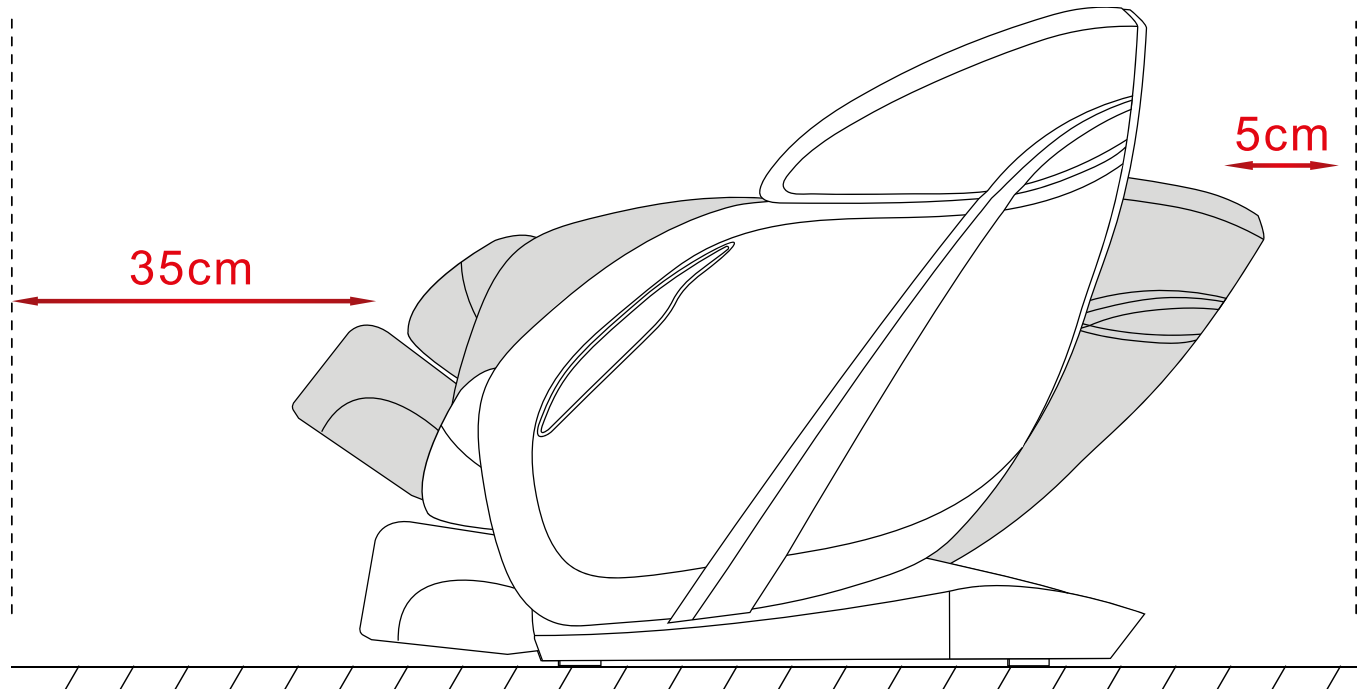

Vor der Inbetriebnahme

DAS BEDIENPANEL MIT DEM MASSAGESESSL VERBINDEN:


Verbinden Sie das Kabel des Bedienpanels mit dem Kabel rechts neben der Sitzfläche, unterhalb der Auflagematte.

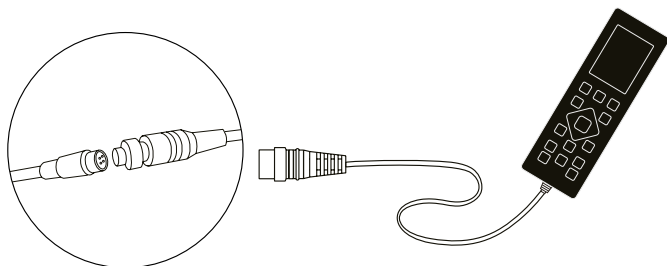

HINWEIS: Wenn Ihr **brainLight**-Massagesessel *flow* mit einem **brainLight** Synchro PRO Chair oder relaxTower verbunden ist und Sie ausschließlich die vollautomatischen und aufeinander abgestimmten **brainLight**-Licht-/Ton-/Massageprogramme nutzen möchten, können Sie das Bedienpanel auch abmontieren.

DIE **brainLight**-TIEFENENTSPANNUNGSEINHEIT MIT DEM MASSAGESESSL VERBINDEN:


1. Verbinden Sie Ihren **brainLight** Synchro PRO Chair oder den **brainLight** relaxTower mit dem im Lieferumfang enthaltenen Verbindungskabel.
2. Stecken Sie den Kaltgerätestecker in den Massagesessel und den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Schalten Sie den EIN-/AUS-Schalter ein.

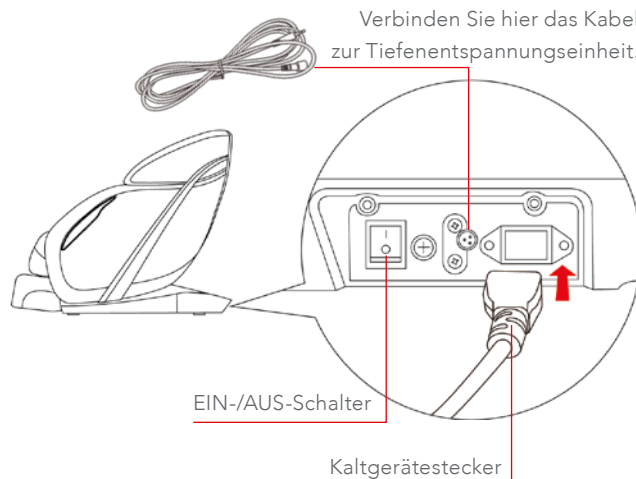



Vor der Inbetriebnahme

BEFESTIGEN DER AUFLAGEMATTE UND DES KISSENS:


- Befestigen Sie die Auf-
lagematte mit dem
Reißverschluss rechts
und links an der Rücken-
lehne und am Sitz-
bereich des Massage-
sessels.

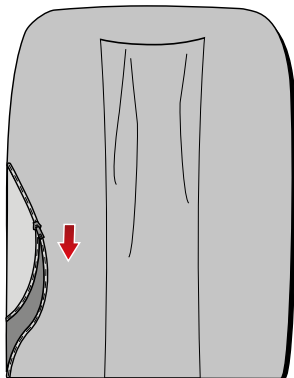


- Befestigen Sie die faltbare Rückenauflage am oberen
Rand der Rückenauflage mit dem Reißverschluss.

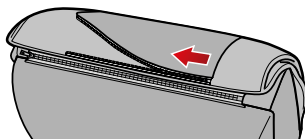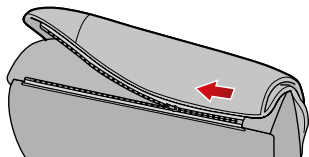

- Befestigen Sie das Kissen mit dem Klettverschluss
an der Rückenauflage.

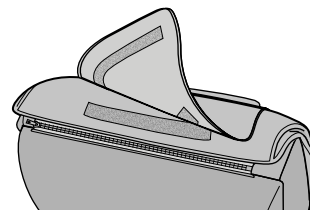

- Wenn Sie die Massage im Rückenbereich intensivie-
ren möchten, können Sie die Rückenauflage zu einem
zweiten Kopfkissen falten (siehe Foto auf S. 21) oder
ganz entfernen.

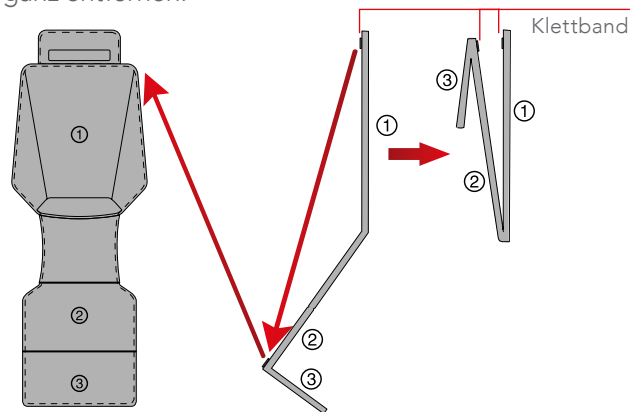

Das Bedienpanel

HINWEIS:

Auf dem Display ist eine sehr dünne Schutzfolie angebracht, die auf Wunsch abgezogen werden kann.

Bedienpanel-Display ①

DIE KURZWahltASTEN:

An-/Aus ②

Luftdruckmassage ③

4-Wege-Auswahl ④

Massagerollen nach oben fahren ⑤

Wärme-Funktion ein-/ausschalten ⑥

Fußteil nach oben fahren ⑦

Fußteil nach unten fahren ⑨

Liegepositionen ⑧

⑩ Automatikprogramme


⑪ Play/Pause

⑫ Menü

⑬ Massagerollen nach unten fahren

⑭ Sitzwinkel nach vorne verstellen

⑮ Sitzwinkel nach hinten verstellen

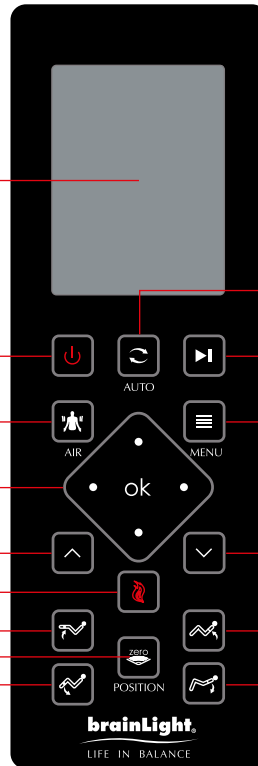

Symbole des Bedienpanel-Displays

Nach dem Drücken der An-/Aus-Taste wird der Bodyscan durchgeführt und Sie haben die Möglichkeit, die Position der Massagerollen noch manuell anzupassen. Danach erscheint Folgendes auf dem Display:



Wenn Sie die Menü-Taste drücken, erscheint Folgendes auf dem Display:



Das Bedienpanel: Die Kurzwahltasten

- 2  **An-/Aus-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel einzuschalten. Der Body-scan beginnt, um die Massage an Ihren Rücken anzupassen. Manuell können Sie jetzt noch die Position der Massagerollen verändern.
- 3  **Luftdruck-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um das Menü für die Luftdruckmassage aufzurufen.
- 4  **4-Wege-Auswahl-Taste:** Mit diesen Tasten können Sie innerhalb der Benutzeroberfläche des Menüs navigieren. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK".
- 5 + 13   **Auf-/Ab-Tasten:** Drücken Sie diese Tasten zur manuellen Anpassung der Position der Massagerollen.
- 6  **Wärme-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Wärmefunktion ein- und auszuschalten.
- 7 + 9   **Fußteil-Auf-/Ab-Tasten:** Drücken Sie diese Tasten zur manuellen Anpassung des Beinwinkels.
- 8  **Zero-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um drei verschiedene Liegepositionen einzustellen.
- 10  **Automatik-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um eines der Automatikprogramme RELAX, REFRESH, SCHULTER/NACKEN, HÜFTE/RÜCKEN, STRETCH oder DREAM auszuwählen.
- 11  **Play-/Pause-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um die Massage anzuhalten. Mit erneutem Drücken der Taste wird das Massageprogramm fortgesetzt.
- 12  **Menü-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um im Menü alle Einstellungen vornehmen zu können.
- 14 + 15   **Sitzwinkel-Auf-/Ab-Taste:** Drücken Sie diese Tasten zur manuellen Anpassung des Sitzwinkels.

HINWEIS:

Während der Automatikprogramme sind nicht alle Kurzwahltasten aktiv (Details siehe S. 16).

Die Sesselfunktionen: Kurzanleitung



Bodyscan zur Anpassung an unterschiedliche Körpertypen

1. **An-/Aus-Taste** (2) drücken.
2. Der **Bodyscan** startet automatisch.
3. Nach dem Bodyscan sehen Sie auf dem Display "**Anpassung Rückenlehne ...**". Falls die Massagerollen noch nicht optimal im Schulterbereich positioniert sind, können Sie dies nun mit den Tasten 5 und 13 anpassen.
4. Das **voreingestellte Automatik-Programm „RELAX“** (60 Min.) startet automatisch.
5. Jetzt können **Anpassungen** vorgenommen werden, z.B. ein anderes Automatik-Programm auswählen, eine kürzere Zeitdauer einstellen etc. Sie haben dabei die Möglichkeit:
 - die Kurzwahltasten (3 – 10 und 13 – 15) zu nutzen oder
 - die gewünschte Funktion im Menü (12) anzuwählen.

Das gewählte Programm können Sie mit der **Play-/Pause-Taste** anhalten und durch ein nochmaliges Drücken dieser Taste weiterlaufen lassen. Bitte schalten Sie nach Programmende den Massagesessel aus.

Die Sesselfunktionen: Steuerung über das Menü



Mit der **Menü-Taste** (12) Ihres Bedienpanels wird das Benutzermenü des Massagesessels aufgerufen. Hier können Sie zu den einzelnen Funktionen individuelle Einstellungen vornehmen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste "OK". Drücken Sie erneut die Menü-Taste, um das Benutzermenü zu verlassen.

Unter **EINSTELLUNGEN / ZEIT** kann die Dauer der Massage und unter **SPRACHE** die **Sprachführung** des Benutzermenüs angepasst werden.



Im Menüpunkt **AUTO** können Sie aus 6 voreingestellten Automatikprogrammen wählen.

Die Fußsohlenmassage kann bei jedem der Automatikprogramme individuell hinzu- oder abgeschaltet werden.

Bei den Automatikprogrammen **STRETCH** und **DREAM** kann die Position des Massagesessels **nicht** angepasst werden.

Nicht angepasst werden kann während der Automatikprogramme:

- die Position der Massagerollen (Taste 5 und 13)
- die Massagegeschwindigkeit im Rücken- und Fußbereich.

Die Sesselfunktionen: Steuerung über das Menü



Der **brainLight**-Massagesessel *flow* verfügt über 5 verschiedene Massagearten: Kneten, Klatschen, Klopfen, Tappen und Shiatsu für den Rücken-, Lenden- und Pobereich in bis zu 6 Geschwindigkeitsstufen.



Die einzelnen Massagearten können im Menüpunkt **MANUELL** über **MODUS** ausgewählt werden.

Mit **REGION** legen Sie den Körperbereich fest, in dem Sie gerne massiert werden wollen.

MANUELL	
MODUS	KNETEN
REGION	KLATSCHEN
WEITE	KLOPFEN
GESCHW.	TAPPEN
	SHIATSU
Richtungstasten zur Auswahl, OK zur Bestätigung.	

MANUELL	
MODUS	SCHULTERN
REGION	LENDE
WEITE	RÜCKEN
GESCHW.	PUNKT
Richtungstasten zur Auswahl, OK zur Bestätigung.	

Die Sesselfunktionen: Steuerung über das Menü

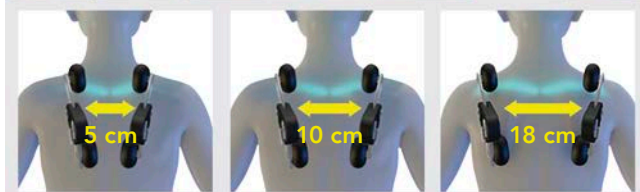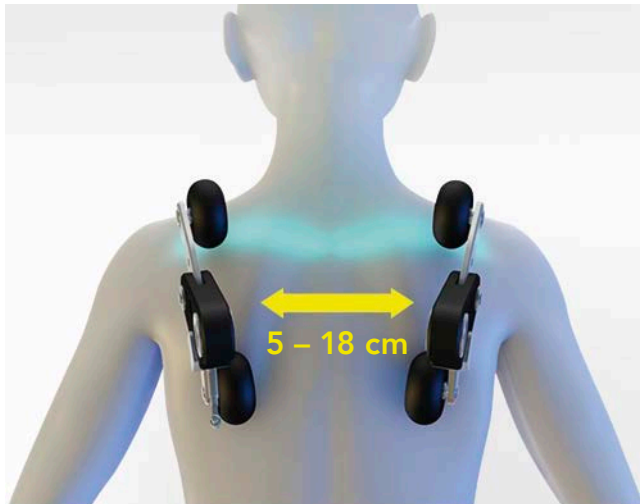

3 verschiedene Massageweiten

MANUELL	
MODUS	WEIT
REGION	MITTEL
WEITE	NAH
GESCHW.	
Richtungstasten zur Auswahl, OK zur Bestätigung.	

Den Abstand der Massage-
rollen können Sie über
WEITE in 3 verschiedenen
Abständen einstellen:

WEIT = 18 cm

MITTEL = 10 cm

NAH = 5 cm

Nicht möglich ist dies bei den
Massagearten "KNETEN"
und "KLOPFEN".

MANUELL	
MODUS	1
REGION	2
WEITE	3
GESCHW.	4
	5
	6
Richtungstasten zur Auswahl, OK zur Bestätigung.	

Mit **GESCHWINDIGKEIT**
können Sie aus einer von 6
Geschwindigkeitsstufen für
die jeweilige Massageart
wählen.

Die Sesselfunktionen: Steuerung über das Menü




Luftdruckmassage



Mit Luftdruckmassage massiert der **brainLight**-Massagesessel *flow* die sensibleren Körperbereiche, wie Schultern, Arme, Hände, Hüfte, Beine und den Fußbereich (wenn Ihr Massagesessel ein Fußteil hat).

Die Einstellungen hierzu können im Menüpunkt **LUFTDRUCK** vorgenommen werden.

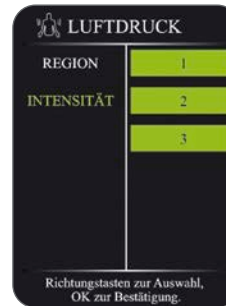

Über **REGION** kann der gewünschte Körperbereich ausgewählt werden. Mit **AUTO** werden alle Körperbereiche massiert.

Mit **INTENSITÄT** kann die Stärke der Luftdruckmassage in drei Stufen eingestellt werden.

Die Sesselfunktionen: Steuerung über das Menü



Unter dem Menüpunkt **WÄRME** auf dem Display kann die **Wärme-Funktion** im seitlichen Lendenbereich zugeschaltet werden. Wärme revitalisiert Ihre Zellen und verbessert die Durchblutung. Sie können die **Wärme-Funktion** bei den automatischen sowie den manuellen Massageprogrammen hinzu- oder abschalten.



Die **Fußsohlenmassage** kann mit **FUSSROLLEN** hinzu- bzw. ausgeschaltet werden, falls ein Fußteil vorhanden ist. Die Geschwindigkeit der Fußsohlenmassage lässt sich hierbei in 3 Stufen variieren.

Manuelle Anpassungsmöglichkeiten

INTENSITÄT DER FUSSSOHLENMASSAGE

Wenn Ihr Massagesessel ein Fußteil hat, können Sie die Intensität der Fußsohlenmassage verringern, indem Sie die im Lieferumfang enthaltenen Einlagepads einlegen.



INTENSITÄT DER RÜCKENMASSAGE

Um die Intensität der Rückenmassage zu erhöhen, können Sie:

- das Kopfkissen für eine stärkere Massage im Nackenbereich zurückklappen.
- die Rückenauflage zu einem zweiten Kopfkissen falten oder ganz entfernen (siehe auch S. 11).



Weitere Sesselfunktionen



Durch das Drücken der **Zero-Taste** können Sie drei verschiedene Liegepositionen einstellen. Das Zero-Symbol erscheint hierbei auf dem Display. Ist das Symbol nicht zu sehen, ist die Zero-Funktion ausgeschaltet bzw. wird von der aktuellen Anwendung nicht unterstützt.

Die Zero-Position (= Zero Gravity) als die tiefste der drei wählbaren Liegepositionen ahmt die liegende Haltung von Astronauten beim Start in den Weltraum nach, mit welcher der starke und plötzliche Anstieg der Schwerkraft auf sichere Weise auf den Körper verteilt wird.

Der **brainLight**-Massagesessel *flow* nutzt denselben Effekt, um Ihr Gewicht optimal auf den Sessel zu verteilen. Dies entlastet den Körper und ermöglicht ein intensiveres Massageerlebnis. Die daraus resultierende Stressreduzierung für Ihren Körper ist so effektiv, dass Sie sich dadurch praktisch schwerelos fühlen.

Ein weiterer Vorteil der Zero-Position ist, dass sie die Durchblutung in den Beinen fördert und Schwellungen reduziert. Indem Ihre Beine über das Herz gehoben werden, kann u.a. Krampfadern vorgebeugt werden.

PROBLEM: KEIN STROM

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass der Sessel eingeschaltet ist. Der Hauptschalter befindet sich auf der Rückseite des Sessels unten (siehe S. 7). Das Symbol „I“ wird beim Einschalten nach innen gedrückt. Sollten Sie immer noch keinen Strom haben, gehen Sie über zu Schritt 2.

Schritt 2: Überprüfen Sie beide Enden des Netzkabels und vergewissern Sie sich, dass es sowohl fest in den Sessel, als auch in die Steckdose eingesteckt ist. Sollten Sie immer noch keinen Strom haben, gehen Sie über zu Schritt 3.

Schritt 3: Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose funktioniert, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen. Sollte die Steckdose funktionieren, der Sessel jedoch nicht, gehen Sie über zu Schritt 4.

Schritt 4: Tauschen Sie die Hauptsicherung (7 Ampère) des Sessels aus (siehe S. 7).

Sollten alle Versuche zur Problemlösung erfolglos bleiben, dann kontaktieren Sie bitte die **brainLight** GmbH.

REINIGUNG & PFLEGE VON SESSEL UND BEDIENPANEL

ACHTUNG: Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie Sessel und Bedienpanel reinigen.

Außer dem Sesselbezug können Sie alle anderen, von außen erreichbaren Sesselteile mit einem weichen Pflgetuch von Staub und Verschmutzungen reinigen. Das Bedienpanel kann im ausgeschalteten Zustand mit einem weichen Tuch, das leicht angefeuchtet sein kann, von Staub und Verschmutzungen gereinigt und mit einem trockenen weichen Tuch abgetrocknet werden.

Der Massagesessel hat standardmäßig einen Bezug aus OEKO-Tex 100-zertifiziertem Kunstleder.



Der Massagesessel kann leicht gereinigt und bei Bedarf auch desinfiziert werden. Wir empfehlen, ihn bei längerem Nichtgebrauch mit einer Stoffhülle abzudecken.

REINIGUNG DES KUNSTLEDER-SESSEL-BEZUGES

Grundsätzliches

Bei Kunstleder handelt es sich um ein vergleichsweise unempfindliches Material. Die nachfolgenden Hinweise zu Pflege und Reinigung sollen dazu beitragen, die Optik und Qualität Ihres Massagesessels zu erhalten:

- Wie bei allen Polstermöbeln kann der Bezugsstoff Ihres Massagesessels durch direktes Sonnenlicht oder starke Hitze (zum Beispiel durch unmittelbare Nähe zu Heizungen) verbleichen und schneller verschleißern. Die richtige Platzierung sowie Gardinen und Jalousien können diesem Effekt entgegenwirken.
- Mit der Zeit verlieren Kunstleder ihre Weichmacher und können trocken und brüchig werden. Dieser Prozess lässt sich nicht verhindern, aber durch behutsamen Umgang und regelmäßige Reinigung hinauszögern. Es ist möglich, Ihren Sessel durch uns komplett oder teilweise neu beziehen zu lassen (Preise auf Anfrage).

Reinigung und Pflege

Schritt 1: Benetzen Sie ein weiches Tuch mit handwarmem Wasser, in das ein wenig Reinigungsmittel (es dürfen keine Lösungsmittel oder scheuernden Produkte benutzt werden – bitte beachten Sie unsere Reinigungsmittlempfehlungen) gegeben wurde. Das Tuch sollte nur leicht feucht sein. Wischen Sie eine, durch Nähte eingegrenzte, Fläche nach der anderen ab; arbeiten Sie dabei jeweils mit kreisenden Bewegungen vom Rand zur Mitte hin.

Schritt 2: Wischen Sie das Kunstleder anschließend genauso mit einem zweiten weichen Tuch, das in handwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel angefeuchtet wurde, nach.

Schritt 3: Trocknen Sie den Bezugsstoff mit einem weiteren trockenen und weichen Tuch ab.

Erste Hilfe, Wartung & Pflege



Für eine fachgerechte Reinigung und Desinfektion Ihres Massagesessels empfehlen wir die bewährten Pflegemittel der Firma Sonett, erhältlich bei uns oder im Fachhandel.


Entfernung von Flecken und Schmutz:

Je eher Sie auftretenden Schmutz und Flecken entfernen, desto besser wird das Ergebnis.

- Saugen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem sauberen, weichen Tuch auf und wischen Sie wie beschrieben in drei Schritten nach.
- Eintrockneten Schmutz sollten Sie nicht abkratzen, sondern vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand (z. B. mit einem stumpfen Messerrücken) abschieben und im Anschluss wie beschrieben in drei Schritten nachwischen.
- Hartnäckige Flecken können Sie auch mit Hilfe einer weichen Bürste behandeln. Benetzen Sie diese mit handwarmem Wasser, in das ein wenig Reinigungsmittel gegeben wurde, und wischen Sie wieder in drei Schritten nach.

HINWEIS: Die hier aufgeführten Tipps stellen keine Garantie dar und befreien Sie nicht von Ihrer Sorgfaltspflicht im Umgang mit dem Massagesessel und den Reinigungshilfsmitteln. Wir übernehmen keine Haftung für jegliche bei der Reinigung oder Pflege entstandenen Schäden.

Produkt- und Verpackungsmaße

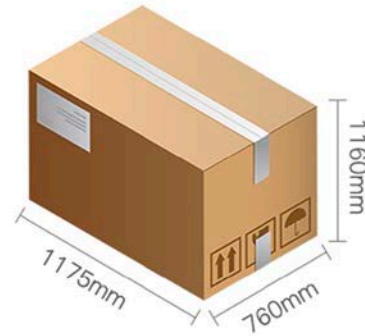

TECHNISCHE DATEN

Produktbezeichnung:

brainLight-Shiatsu-Massagesessel *flow*

Vertikale Reichweite der Massagerollen: **105 cm**

Positionswinkel des Sessels: **128° – 150°**

Betriebsspannung: **AC 220 – 240 V; (50 Hz – 60 Hz)**

Leistung: **170 W**

Motorspannung: **DC 24 V**

Gewicht: **83 kg** +/- 3 kg



Maße: **ca. L 140 (161) cm x B 75 cm x H 111 (90) cm**

Die Angaben in Klammern entsprechen den Maßen des Sessels, wenn er mit waagerechter Fußstütze vollständig zurückgefahren ist.

Der **brainLight**-Shiatsu-Massagesessel *flow* kann für eine ganzheitliche geistige und körperliche Entspannung mit dem **brainLight relax**Tower oder dem **brainLight** Synchro PRO chair zum Komplettsystem kombiniert werden (www.brainlight.de/produkte).

Unter **www.brainlight.de/service** finden Sie einen Service-Bereich mit den Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), mit Dokumentationen, technischen Daten und Produkt-Informationen zum Download.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Scan, Fotokopie, Mikrofilm oder mit einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der **brainLight** GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder vervielfältigt werden.

© 2025 **brainLight** GmbH

Entspannungstechnologie Made in Germany!



brainLight GmbH • Hauptstraße 52 • 63773 Goldbach • Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 59070 • Telefax: +49 (0) 6021 590797 • E-Mail: info@brainlight.de

www.brainlight.de

brainLight®

LIFE IN BALANCE

◆◆◆ Seit 1988 ◆◆◆